

## NÁVOD K OBSLUZE PRO IRSKÉ KŘESLO



## Návod k obsluze, poučení a proškolení obsluhy Irského křesla.

### 1. Naklopení křesla:

Sešlápnutím pedálu ovládání se uvolní píst a křeslo je možné naklápět. Uvolněním pedálu se křeslo zaaretuje v dané pozici.

### 2. Polohování opěrky nohou:

Polohování směrem nahoru se provádí ručně zvednutím do polohy podle drážek v rastru..

Pro spuštění se musí opěrka zvednout do maxima a poté je možné ji spustit dolů.

### 3. Držák infúzních sáčků a lahví :

Držák se vsazuje na libovolnou stranu v hlavové části křesla do připravených, k tomuto účelu sloužících otvorů, a následovně se zajistí šroubem s umělohmotnou hlavicí a to ze zadní strany křesla.

### 4. Jídelní deska :

Jídelní deska je uložena v koženkovém vaku umístěném na zadní straně křesla. Pro použití se deska vyjme a uchytí se vsunutím čepů na desce do otvorů v bocích křesla.

### 5. Pojezdová kolečka :

Podvozek je osazen čtyřmi kolečky ve třech možných variantách (viz bod 7. Technický popis).

Brzdí se sešlápnutím brzdové šlapky, odjištění je opačným způsobem.

### 6. Čištění a dezinfekce křesla :

Křeslo se nesmí kropit, nebo polévat vodou a jinými tekutinami.

Čištění a dezinfekci křesla lze provádět běžnými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví.

Tyto prostředky se na křeslo nanáší vlhkým hadrem

### 7. Technický popis :

Křeslo je tvořeno dvěma základními částmi, a to základním rámem a sedákem spojeným se stavitelnou opěrkou nohou. **Tato opěrka nesmí být vysunuta při polohování křesla.**

Každá z těchto částí je tvořena rámem z ocelových trubek nastříkaných komaxitem. Rám je polstrován a potažen koženkou.

Podvozek je osazen čtyřmi kolečky, a to v těchto variantách:

a) Přední kolečka jsou otočná o 360° a nejsou vybavena brzdou. Zadní kolečka jsou vybavena brzdou a jsou rovněž otočná o 360°.

Dále je na podvozku umístěno ovládání naklápění sedáku, které je tvořeno pístem a ovládacím pedálem a táhlem.

Na sedáku je připevněna stavitelná opěrka nohou. Tato opěrka je stavitelná pomocí dvou polohovatelných rastrů. Opěrka je rovněž z ocelových trubek nastříkaných komaxitem opatřených polstrováním a potažených koženkou.

Dalším příslušenstvím je koženkový vak a jídelní deska.

Maximální zatížení křesla je 1500 N.

Čištění křesla se provádí vlhkou utěrkou a pomocí běžných čistících prostředků.

b) Přední kolečka jsou přímá a nejsou vybavena brzdou. Zadní kolečka jsou vybavena brzdou a jsou otočná o 360°.

c) Přední i zadní kolečka jsou vybavena brzdou a jsou otočná o 360°.

## 8. Popis křesla



1. Rám
2. Sedák s opěrkou hlavy
3. Stavitelná opěrka nohou
4. Jídelní deska
5. Pojezdová kolečka
6. Držák na infúzní stojan

## 9. Technické údaje :

Šířka křesla	730 mm
Výška křesla	1330 mm
Šířka sedáku	500 mm
Výška sedáku	500 mm
Délka stav.opěrky nohou	380÷530 mm
Výška opěrek rukou	770 mm
Úhel naklopení křesla	35°
Úhel naklopení opěrky nohou	75°

Podmínky pro provoz, dopravu a skladování :

Teplota	+5°C÷ +40°C
Vlhkost	30% ÷ 90%
Tlak	700hPa ÷ 1060hPa

Maximální zatížení křesla	150 kg
Hmotnost křesla	56 kg

**Natur comfort distribuce výroba s.r.o.**, Buštěhradská 282, 272 033 Kladno  
tel./fax:+420 312 243 513, tel.: +420 312 245 379, [www.naturcomfort.cz](http://www.naturcomfort.cz), [info@naturcomfort.cz](mailto:info@naturcomfort.cz)

**Zelená linka: 800 866 866**

#### **10. Balení**

Irské Křeslo je dodáváno zabalené do smršťovací fólie a kartónové krabice vyplněné molitanovou výplní.

#### **11. Hodnocení biokompatibility**

Viz příloha "Zkušební zpráva č.j.41230603/96"

#### **12. Údržba**

Základní údržba se provádí minimálně jednou za 3 měsíce obsluhou. Minimálně jednou za rok musí být provedena preventivní prohlídka servisním technikem výrobce.

#### **13. Likvidace**

Křeslo obsahuje části, které mohou při její likvidaci negativně ovlivnit životní prostředí. Je proto nutné se v tomto případě obrátit na příslušné zpracovatele druhotných surovin.

#### **14. Záruka a servis**

Na Irské křeslo je poskytována záruka **24 měsíců** ode dne dodání, není-li kupní smlouvou stanoveno jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, případně opravci autorizováni výrobcem.