

Dodavatel: Natur comfort NP, s.r.o. IČ: 28968620, DIČ: CZ28968620, Buštěhradská 282, 237 03 Kladno 3
tel./fax:+420 312 243 513, tel.: +420 312 245 379, zelená linka: 800 866 866
www.naturcomfort.cz info@naturcomfort.cz

PODTLAKOVÉ TYČOVÉ MADLO


Návod k použití:

POZOR:

Čtěte pozorně veškeré informace a pokyny, než začnete používat madlo!

- Podtlakové tyčové madlo není konstruováno na nosnost celé tělesné váhy.
- Toto madlo je určeno pro každodenní přirozený pohyb, příklad při vstupu a výstupu ze sprchového koutu.
- Před použitím **vždy** přezkontrolujte, zda je připevnění ke zdi v pořádku.
- Nepřipevňujte madlo na pohyblivou plochu.
- Maximální uživatelská hmotnost:
70 kg / laterální a vertikální/
25 kg /šikmé/

Madlo je konstruováno pouze pro hladké a neporézní povrchy: obkladačky, sklo, porcelán, skleněné vlákno. Nelze použít na palubky, dřevo, malby nebo jinak připravené povrchy.

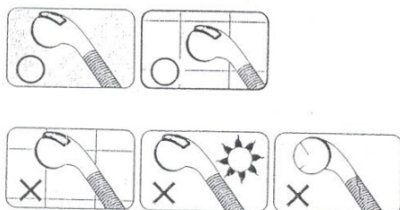

Připevnění:

1. Důkladně očistěte podklad s lihem a zkontrolujte přísavné kalíšky, zda jsou v pořádku. Nepoužívejte, je-li poškozené, prasklé nebo našťípnuté.
2. Zvedněte obě páčky, umístěte madlo tak, aby obě přísavky ležely naprosto pevně na hladkém povrchu.
3. Podržte jeden konec a zatlačte dlaní na jednu páčku. Měli byste cítit odpor, jak se přísavný kalíšek napíná/smršťuje/přitahuje.



Sejmutí:

1. Zvedněte obě páčky.
2. Pokud připevnění přísátí přetrvává, jemně zvedněte jeden okraj prstem.
3. Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly poškodit přísavný kalíšek.
4. Vždy nechte páčky zvednuté, až do dalšího použití.

Patentovaný indikátor podtlaku

„Zelená“ označuje správné přichycení, v opačném případě se zobrazí „červená“ pro kontrolu povrchu na upevnění a znovupřipevnění.

Neumísťujte/nepřipevňujte přes spáry nebo na hrubou omítku.



zelená = OK



červená = znovu