

Dodavatel: Natur comfort distribuce výroba s.r.o., Buštěhradská 282, 272 03 Kladno
tel./fax:+420 312 243 513, tel.: +420 312 245 379, zelená linka: 800 866 866
www.naturcomfort.cz info@naturcomfort.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-tex

1. Složení

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-tex jsou výrobky s jádrem z vysoce kvalitní polyuretanové pěny, jejichž povrch je opatřen polyesterovou tkaninou s jednostranným polyuretanovým zátěrem (= PU-tex).

2. Použití

Foam for Care pomůcky s povrchovou úpravou PU-tex slouží převážně k podepření, uklidnění, polohování a k fixaci pacientů (např. polohovací válečky, půlpálce, kostky, díly k podepření, podložky pod hlavu, kroužky, kolečka, tělesné opěry, opěry pro nohy aj). Foam for Care výrobky jsou určeny pro pacienty s nepoškozenou kůží.

3. Zařazení do třídy

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-tex jsou produkty pro zdravotnictví zařazené do třídy I (nejsou sterilní, nejsou invazivní).

4. Vlastnosti

- prodyšné, vodě odolné
- neobsahuje PVC
- snadno čistitelné a hygienické, odolné, dobře se přizpůsobují tělu – netvoří se záhyby
- nejsou antistatické a nejsou elektricky vodivé

5. Návod k použití a čištění

- teplotní rozmezí pro používání +10 až +50 °C
- povrchová znečištění lze odstranit jemnou textilií navlhčenou ve vodě s obsahem saponátového prostředku pro čištění, dezinfekci a praní. Nepoužívat látky obsahující formaldehydy nebo fenoly!
- trvalejší znečištění lze odstranit otíráním alkoholem (methyl, líh) a následně horkou vodou s neutrálním čistícím prostředkem
- čištění v parním autoklávu do 130 °C po dobu 6-7 minut
- dezinfekci potahu lze provádět běžnými neutrálními dezinfekcemi v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví (např. roztok chloroxylenu 4,9 g/100 g vody, roztok 2-propanolu 50 ml/m³ vody nebo 0,5 % chloraminový roztok). Po provedení dezinfekce je vždy nutné povrch opláchnout čistou vodou a řádně vysušit
- potah lze prát při teplotě až 95°C – doporučuje se 60°C (prodlužuje se tím životnost potahu)
- potah nelze mandlovat! Žehlení potahu je zakázáno

6. Možná rizika při používání :

- poškození výrobku a změna jeho vlastností může být způsobeno jeho nevhodným zacházením
- Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-tex by neměly používat osoby, které jsou alergické nebo citlivé na polyuretan
- nebezpečí požáru při působení otevřeného zdroje ohně a vysokých teplot
- poškození povrchu používáním, čištěním a dezinfekcí, používáním ostrých předmětů
- nebezpečí udušení málo prodyšným povrchem
- tvorba choroboplodných zárodků způsobená nehygienickým skladováním nebo nedostatečnou dezinfekcí a čištěním
- možné zrudnutí kůže, pocení

7. Trvanlivost a likvidace

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-tex mají při správném používání a skladování trvanlivost min 2 roky. Nepotřísněné výrobky lze zlikvidovat jako běžný odpad. Potřísněné (kontaminované) výrobky lze odstranit nejlépe ve spalovně odpadu.