

Dodavatel: Natur comfort distribuce výroba s.r.o., Buštěhradská 282, 272 03 Kladno
tel./fax: +420 312 243 513, tel.: +420 312 245 379, zelená linka: 800 866 866
www.naturcomfort.cz info@naturcomfort.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-med

1. Složení

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-med jsou výrobky s jádrem z vysoce kvalitní polyuretanové pěny, jejichž povrch je opatřen vodotěsným a téměř neprodyšným polyuretanovým nástřikem (= PU-med).

2. Použití

Foam for Care pomůcky s povrchovou úpravou PU-med slouží převážně k podepření, uklidnění, polohování a k fixaci pacientů (např. polohovací válečky, půlválce, kostky, díly k podepření, podložky pod hlavu, kroužky, kolečka, tělesné opěry, opěry pro nohy aj). Foam for Care výrobky jsou určeny pro pacienty s nepoškozenou kůží.

3. Zařazení do třídy

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-med jsou produkty pro zdravotnictví zařazené do třídy I (nejsou sterilní, nejsou invazivní).

4. Vlastnosti

- prodyšné, vodě odolné
- podpírající, vysoce nosné a elastické
- snadno čistitelné a hygienické, odolné, dobře se přizpůsobují tělu
- nejsou antistatické a nejsou elektricky vodivé

5. Návod k použití a čištění

- teplotní rozmezí pro používání +10 až +50 °C
- čištění v parním autoklávu do 135 °C, povrchová dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky (použití dle návodu)
- počet čištění v parním autoklávu max. 15
- skladovat v suchém a čistém prostředí, chránit před přímým světlem

6. Možná rizika při používání :

- poškození výrobku a změna jeho vlastností může být způsobeno jeho nevhodným zacházením
- Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-med by neměly používat osoby, které jsou alergické nebo citlivé na polyuretan
- nebezpečí požáru při působení otevřeného zdroje ohně a vysokých teplot
- poškození povrchu používáním, čištěním a dezinfekcí, používáním ostrých předmětů
- nebezpečí udušení málo prodyšným povrchem
- změna zabarvení, žloutnutí, zkrěhnutí působením slunečního světla nebo UV záření
- tvorba choroboplodných zárodků způsobená nehygienickým skladováním nebo nedostatečnou dezinfekcí a čištěním
- možné zrudnutí kůže, pocení

7. Trvanlivost a likvidace

Foam for Care výrobky s povrchovou úpravou PU-med mají při správném používání a skladování trvanlivost min 2 roky. Nepotřísněné výrobky lze zlikvidovat jako běžný odpad. Potřísněné (kontaminované) výrobky lze odstranit nejlépe ve spalovně odpadu.