

Dodavatel: Natur comfort distribuce výroba s.r.o., Buštěhradská 282, 272 03 Kladno  
tel./fax:+420 312 243 513, tel.: :+420 312 245 379, zelená linka: 800 866 866  
[www.naturcomfort.cz](http://www.naturcomfort.cz) e-mail: [info@naturcomfort.cz](mailto:info@naturcomfort.cz)

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP ZVEDÁKY ELEKTRICKÉ POJÍZDNÉ

Zvedák elektrický

typ: 1006 Standard Variant, 1006 Maxi, 1006 Deluxe

### POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Zvedáky jsou určeny pro přesun a transport tělesně postižených osob a osob s výrazně sníženou schopností mobility. Musí být doplněny vhodným transportním závěsem. Svou konstrukcí a provozními vlastnostmi jsou vhodné především pro interiérový provoz. Zvedák je určen k ovládnání doprovodnou osobou.

### POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

1. Závěsná hrazda
2. Zdvihací rameno
3. Ovladač
4. Madla
5. Kontrolní jednotka s baterií
6. Elektromotor
7. Páka rozevírání základny
8. Aretační matice
9. Základna

### BATERIE A JEJÍ DOBÍJENÍ

Zvedák je vybaven bezúdržbovou baterií, která je umístěna na boku držáku zdvihacího ramene.

*Model Standard, Maxi a Deluxe*

1. zapojte dobíjecí kabel do kontrolní jednotky a do sítě
2. až se rozsvítí zelená kontrolka je baterie nabitá
3. odpojte nabíjecí kabel

*Model Maxi a Deluxe ( externím nabíječem)*

1. vyjměte baterii z držáku a vložte ji do nabíječe
2. zapojte nabíječ pomocí kabelu do sítě
3. až se rozsvítí zelená kontrolka je baterie nabitá
4. uložte baterii zpět do držáku

### TECHNICKÉ PARAMETRY

**1006 Deluxe 1006 Maxi 1006 Standard Variant**

**Maximální zatížení** 125 kg 175 kg 150 kg

**Hmotnost ramene** 21 kg 20,5 kg 20,5 kg

**Maximální výška ramene** 198 cm 198 cm 200 cm

**Délka základny** 115 cm 115 cm 115 cm

**Šířka otevřené základny** 125 cm 125 cm 116 cm

**Kolečka** 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm

**Hmotnost základny** 24,5 kg 21kg 19,5 kg

**Hmotnost celková** 54,5 kg 51,5 kg 40 kg

**Minimální výška ramene** 65 cm 65 cm 68 cm

**Šířka zavřené základny** 59 cm 59 cm 59 cm


**Výška základny** 12 cm 12 cm 12 cm



## ROZLOŽENÍ/SLOŽENÍ ZVEDÁKU

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části zvedáku, tj. základnu s kolečky, zdvihací rameno s kontrolní jednotkou a baterií, závěsnou hrazdu, ovladač, nabíječ a kabely (kabel k ovládání rozevíratelné základny (modely Deluxe a Maxi), kabel elektromotoru, kabel ovladače a nabíječe).

1. zasuňte stojnu do základny
2. utáhněte aretační šroub (viz obr)
3. pomocí šroubů připevněte zdvihací rameno a elektromotor ke stojně (viz obr)

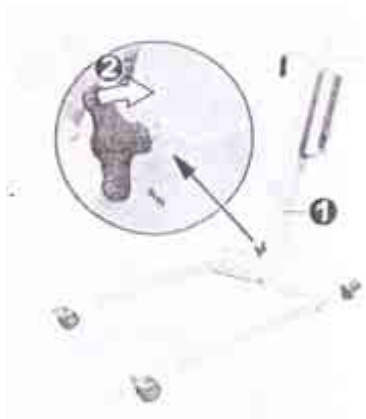

4. připojte kabely ke kontrolní jednotce (viz obr)  
1 – kabel ovladače  
2 – kabel elektromotoru  
3 – kabel motoru otevírání základny (u modelu Maxi a Deluxe)
5. pomocí šroubu připevněte závěsnou hrazdu k zdvihacímu ramenu (viz obr)

## MANIPULACE

1. nejprve připravte pod pacienta odpovídající závěs
  2. přijďte zvedákem nad pacienta tak, aby poloha závěsné hrazdy odpovídala způsobu zavěšení (sed/leh)
  3. pro maximální stabilitu otevřete rám základny a zabrzděte kolečka  
- stlačte ovládací páku a vychylte jí doleva (model Standard)  
- stlačte příslušné tlačítko na ovladači (viz dále) (model Maxi a Deluxe)
  4. zavěste oka závěsu na hrazdu
  5. pomocí ovladače (viz dále) nadzdvihněte rameno zvedáku a dorovnejte závěs tak, aby nikde netlačil
  6. zdvihněte pacienta do požadované výšky
  7. odbrzděte kolečka a zavřete rám základny
  8. převezte pacienta na požadované místo
  9. celý postup opakujte v obráceném pořadí
- Pozn. otevření základny umožňuje také pohodlné najetí k elektrickým vozíkům, toaletním křeslům, sprchovým židlím apod.

## OVLADAČ

Na ovladači se nacházejí 4 tlačítka (viz obr).

- ovládání zdvihu (nahoru/dolu)
- ovládání základny (otevření/zavření rámu)

Pozn. u modelu Standard Variant jsou tlačítka pouze pro zdvih.

## **BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA**

Kontrolní jednotka je vybavena bezpečnostní pojistkou.

1. v případě nouze nebo poruchy ovladače zastavte motor zmáčknutím bezpečnostní pojistky
2. pro opětovnou aktivaci zvedáku pojistku uvolníte otočením pojistky po směru hodinových ručiček

V případě jakékoliv poruchy zvedáku lze pacienta spustit dolů dvěma způsoby:

1. elektricky – pomocí otočení a držení bezpečnostní pojistky (viz výš)
2. mechanicky – pomocí vytažením pojistky na kontrolní jednotce

## **VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ**

- Pečlivě si prostudujte návod a přesně dodržujte všechny instrukce.
- Zvedák může ovládat pouze odborně vyškolená osoba.
- Zvedák nikdy nepřetěžujte. Dodržujte maximální hmotnost uživatele, pro kterou byl zvedák zkonstruován (viz. parametry).
- Zvedák je určen výhradně na transport pacienta pouze na krátké vzdálenosti, a to pouze po bezpečném a rovném terénu.
- Před vlastní manipulací vždy pečlivě překontrolujte upevnění všech částí, dotažení šroubů a zapojení příslušných kabelů.
- Přesvědčte se, zda je baterie před použitím řádně nabitá.
- Pečlivě překontrolujte zda je závěs dobře zavěšen a nainstalován.
- Při zdvihání/pokládání pacienta nezapomeňte vždy zabrzdit pojezdová kolečka.
- Pro manipulaci se zvedákem používejte k tomu určená madla.
- Vždy jeďte opatrně a pomalu, zvláště kolem rohů, nábytku, skrze futra dveří apod.
- Nenechávejte zavěšeného pacienta bez dozoru.
- Pokaždé dbejte na maximální pohodlí pacienta.
- Baterie nenechávejte nikdy úplně vybit, vždy je průběžně dobíjejte.

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## **ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

## **VAROVÁNÍ**

Úprava neschválená dodavatelem Natur comfort distribuce výroba s.r.o., může ovlivnit délku poskytované záruky.

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma Natur comfort distribuce výroba s.r.o., vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.